

Nombre del Equipo: YAG 80



Descripción General del Equipo: Equipo YAG 80 para Eliminación de Tatuajes y manchas de la piel.

Teoría del Tratamiento: El laser de YAG para la Eliminación de tatuajes que rompe en piezas muy finas la pigmentación en las lesiones de la piel (tatuaje) y las remueve usando la alta energía irradiada por el laser, a esto se le llama principio de explosión. Una parte del pigmento (en la superficie de la epidermis) será botado fuera del cuerpo al momento, mientras que la otra parte del pigmento (dentro del cromóforo) será dividido en pequeños gránulos que serán digeridos por las células fagocitas del cuerpo, mismas que serán expulsadas del cuerpo por el sistema linfático. El pigmento de los tejidos lesionados se volverá cada vez más plano hasta desaparecer, mientras deja el tejido circundante quedará sin marcas ni efectos, por que no absorberá el laser de una longitud de onda específica.

Rango de tratamiento: Remoción de Tatuajes por medio del principio de explosión que ayuda a eliminar Materia dermatosa de color y pigmentaciones mixtas, Ayuda a eliminar el pigmento rojo, azul, púrpura, café y otros tonos en la línea de la ceja y/o labios ceja así como también elimina tatuajes en otras zonas de la piel. También es útil para manchas por disfunciones hepáticas, *otas nevus*, marcas de nacimiento y otras coloraciones de la piel.

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuente de Luz:	Laser YAG de tratamiento de gema Q-switch con DKDP y KTP ND hecha en Alemania con patentes mundiales.
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (actualizable).
Cabezal de Luz:	Cabezal ergonómico con rayo de salida de 1 a 8 mm de diámetro (ajustable).
Densidad de Energía:	0 a 750 mJoules por cm ²
Frecuencia de Repetición:	1, 2, 3, 4, 5 y 6 Hertzios
Longitud de Onda:	1064 nm y 532 nm
Ancho de Pulso:	5 ms (ajustable)
Dimensiones Físicas:	35 X 22 X 22 cm.
Peso Neto:	6.5 Kg.
Peso Bruto:	13.5 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 16 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 16 Amperes, 60 Hertzios
Potencia:	400 Watts

Nombre del Equipo: IPL 50



Descripción General del Equipo: Equipo IPL 50 para Depilación Definitiva, Rejuvenecimiento de la Piel, Remoción Vascular, Tratamiento de Acne, Remoción de Manchas y Desvanecimiento de Arrugas.

Teoría del Tratamiento: El sistema de este novedoso equipo de alta tecnología basado en el IPL (Luz Pulsada de Alta Intensidad) tecnología certificada por la CE (Comunidad Europea), la cual usa una luz especial de alta intensidad que en combinación con cristales de diferentes longitudes de onda que filtran la luz y con modificaciones en los parámetros de los pulsos, exposiciones, potencias, etc. permiten manipular la luz de tal forma que se puede usar para brindar diferentes tratamientos, de forma segura y efectiva.

Rango de tratamiento: Depilación Definitiva del vello de prácticamente todo el cuerpo, excepto el que crece en zonas delicadas tales como: en el interior de la nariz u oídos o muy cerca de los parpados y en algunos tejidos mucosos, se pueden tratar cualquier tipo y color de piel y vello. Afecciones de la piel como: el Cloasma, Manchas, Manchas por Quemaduras Solares, Manchas de Edad, Marcas de Nacimiento, Marcas en la Piel por Escabiasis, Alergias, Acné, también suaviza la piel, contrae poros, desaparece puntos negros, estrías, disminuye cicatrices, desvanece arrugas, etc.

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuente de Luz:	Luz de Xenón a 3 ATM hecha en Alemania con patentes mundiales
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (actualizable).
Cabezal de Luz:	Poderoso cabezal ergonómico con rayo de salida de 8 X 34 mm (272 mm ²). Con una Longitud de Onda de 560 a 1200 nm
Densidad de Energía:	20 a 50 Joules por cm ²
Frecuencia de Repetición:	1,2 y 3 Hertzios
Ancho de Pulso del Primer y los Consecuentes:	0.1 a 100 ms (ajustable de 0.1 en 0.1ms)
Ancho de Pulso de Distancia e Intermisión:	0.1 a 100 ms (ajustable)
Secuencia de Pulsos:	De 1 a 20
Enfriador Integrado para la Piel:	Para temperaturas de -8°C hasta 0°C (Se puede ajustar)
Dimensiones Físicas:	50 X 30 X 30 cm.
Peso Neto:	18 Kg.
Peso Bruto:	38 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 3 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 3 Amperes, 60 Hertzios

Potencia:	1,200 Watts
-----------	-------------

Nombre del Equipo: BE 20



Descripción General del Equipo: Equipo Micro-Beam para Embellecimiento del Busto (Reafirma y Agrandado)

Teoría del Tratamiento: El sistema de este novedoso equipo de alta tecnología basado en la tecnología japonesa denominada energía de micro-rayo, la cual usa una luz especial de una longitud de onda particular que al excitar las formaciones de galactóforos y glándulas mamarias activa el nervio simpático, fortaleciendo la presión arterial de los vasos capilares en el busto y promueve la secreción de estrógeno, acelerando la micro-circulación, engrosando el tejido conectivo, solidificando las estructuras de soporte del ligamento suspensorio del pecho, mejorando la forma del cuerpo, despertando el re-crecimiento de las células del busto, e induciendo el desarrollo fundamental de la galactofera y las glándulas mamarias y hace que los lipócitos se reproduzcan, crezcan y aumenten en número, para alcanzar una efectividad real y natural.

Rango de tratamiento: Pechos que se han caído, de tamaño asimétrico. Senos que han sido genealógicamente hipo-genéticos, Senos que se han encogido después de la lactancia. Para evitar y ayudar a curar las enfermedades de los senos, glándulas mamarias y de los galactóforos

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuente de Luz:	Luz de micro-rayo hecha en Japón con patentes mundiales
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (Actualizable).
Cabezal de Luz:	Poderoso cabezal de luz ergonómico con rayo de salida de 8 X 40 mm (320 mm ²).
Cristal Transmisor de Luz:	Gema Pulida por sistemas de control numérico para garantizar su uniformidad y pureza óptica.
Enfriador Integrado para la Piel:	Para temperaturas de -8°C hasta 0°C (Se puede ajustar)
Dimensiones Físicas:	50 X 55 X 101 cm.
Peso Neto:	34 Kg.
Peso Bruto:	75 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 16 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 16 Amperes, 60 Hertzios
Potencia:	800 Watts

Nombre del Equipo: GMF 20



Descripción General del Equipo: Equipo multi-funcional con Micro-Beam para Embellecimiento del Busto (Reafirma y Agrandando) e IPL para Depilación Definitiva, Rejuvenecimiento de la Piel.

Teoría del Tratamiento: Este equipo combina dos tecnologías de punta:

1) Por un lado la tecnología japonesa denominada energía de micro-rayo, la cual usa una luz especial de una longitud de onda particular que al excitar las formaciones de galactóforos y glándulas mamarias activa el nervio simpático, fortaleciendo la presión arterial de los vasos capilares en el busto y promueve la secreción de estrógeno, acelerando la micro-circulación, engrosando el tejido conectivo, solidificando las estructuras de soporte del ligamento suspensorio del pecho, mejorando la forma del cuerpo, despertando el crecimiento de las células del busto, e induciendo el desarrollo fundamental de la galactofera y las glándulas mamarias y hace que los lipócitos se reproduzcan, crezcan y aumenten en número, para alcanzar una efectividad real y natural.

2) Además de contar con el IPL (Luz Pulsada de Alta Intensidad) tecnología certificada por la CE (Comunidad Europea), la cual usa una luz especial de alta intensidad que en combinación con cristales de diferentes longitudes de onda que filtran la luz y con modificaciones en los parámetros de los pulsos, exposiciones, potencias, etc. permiten manipular la luz de tal forma que se puede usar para brindar diferentes tratamientos, de forma segura y efectiva.

Rangos de tratamiento:

Embellacimiento del Busto: Pechos que caídos, de tamaño asimétrico. Senos hipo-genéticos, Senos que se han encogido después de la lactancia. Para evitar y ayudar a curar las enfermedades de los senos y los galactóforos así como también de las glándulas mamarias.

Depilación Definitiva del vello de prácticamente todo el cuerpo, excepto aquel que crece en zonas delicadas tales como en el interior de la nariz u oídos, y en algunos tejidos mucosos

Rejuvenecimiento de la Piel, Afecciones de la piel tales como el Cloasma, Manchas, quemaduras solares, Manchas de edad, Marcas de nacimiento, Marcas en la Piel por Escabiasis, Alergias, Acné, varicela, etc. también suaviza la piel, contrae poros, desaparece puntos negros y poros infectados, desaparece líneas de expresión, estrias pequeñas, marcas de nacimiento, pigmentación por problemas del hígado. Coloración por sangre coagulada, piel roja, manchas rojas, hiper-susceptibilidad en la piel. Casos Especiales: Cara, Face lifting, Venas de gestación (pañó), Nariz enrojecida por venas, Ojeras, Cura de foliculitis y pezones enrojecidos.

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuentes de Luz:	Luz de micro-rayo hecha en Japón con patentes mundiales Luz de Xenón a 3 ATM hecha en Alemania con patentes mundiales
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (Actualizable). Con sistema interno de auto prueba para asegurar un tratamiento seguro.
Cabezal de Luz:	Poderosos cabezales de luz ergonómicos: IPL y MB con 5 filtros y con rayo de salida de 8 X 40 mm (320 mm ²).
Cristal Transmisor de Luz:	Zafiro Pulido por sistemas de control numérico para garantizar su uniformidad y pureza óptica.
Enfriador Integrado para la Piel:	Para temperaturas de -8°C hasta 0°C (Se puede ajustar)
Filtros Incluidos:	<ol style="list-style-type: none"> 1) 420nm para Acne 2) 530nm para Manchas en Piel 3) 560nm para Rejuvenecimiento de la Piel 4) 585nm para Remoción Vasculuar 5) 640nm para Depilación Definitiva
Dimensiones Físicas:	56 X 45 X 130 cm.
Peso Neto:	48 Kg.
Peso Bruto:	75 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 16 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 16 Amperes, 60 Hertzios
Potencia:	1200 Watts

Nombre del Equipo: WO 20



Descripción General del Equipo: Equipo para tratamiento de rejuvenecimiento dérmico con tecnología de Jet Agua/Oxígeno, los tratamientos realizados con este equipo son considerados terapéuticos, por lo que no hay tiempos de recuperación después de cada sesión. Aparte de la acción terapéutica indicada por el equipo, se estimula la regeneración de colágeno incrementando la elasticidad y tonicidad de la piel, limpia y humecta la piel de manera excepcional.

Teoría del Tratamiento:

Este equipo combina dos elementos para un tratamiento único, el oxígeno (O₂) comprimido y el agua (H₂O) para crear un jet que por sus características ayuda a hacer un peeling profundo sin las contraindicaciones de los peelings tradicionales tanto químicos como mecánicos, es decir se puede continuar con la vida diaria, sin tener que cuidarse de los elementos de forma especial como normalmente ocurre cuando se trata de otro tipo de peelings.

Rangos de Tratamiento:

Face lifting, Reducción de Arrugas, Tratamiento de Poros Abiertos, Blanquea la Piel, Rejuvenece la Piel, Mejora la Apariencia de Estrías, Reduce la Apariencia de Cicatrices, Cura la Foliculitis y Trata Venas Rojas en la Nariz, Eficaz en Tratamientos de Acne, Remueve Pigmentaciones en Capas Profundas de la Epidermis, Mejora la Apariencia de la Piel al Humectarla, Regenera y Estimula el Crecimiento del Colágeno.

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuentes de energía:	Combina el tratamiento con Oxígeno comprimido, aire comprimido y Agua
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (Actualizable). Con sistema interno de auto prueba para asegurar un tratamiento seguro.
Cabezal de operación:	Fino cabezal de operación ergonómico que permite una fácil y precisa operación
Enfriador Integrado:	Sistema de enfriamiento que garantiza una operación estable y un tratamiento seguro
Dimensiones Físicas:	50 X 50 X 130 cm.
Peso Neto:	48 Kg.
Peso Bruto:	75 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 3 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 3 Amperes, 60 Hertzios
Potencia:	660 Watts

Nombre del Equipo: WO 30



Descripción General del Equipo: Equipo para tratamiento de rejuvenecimiento dérmico con tecnología de Jet Agua/Oxígeno, los tratamientos realizados con este equipo son considerados terapéuticos, por lo que no hay tiempos de recuperación después de cada sesión. Aparte de la acción terapéutica indicada por el equipo, se estimula la regeneración de colágeno incrementando la elasticidad y tonicidad de la piel, limpia y humecta la piel de manera excepcional.

Teoría del Tratamiento:

Este equipo combina dos elementos para un tratamiento único, el oxígeno (O_2) comprimido y el agua (H_2O) para crear un jet que por sus características ayuda a hacer un peeling profundo sin las contraindicaciones de los peelings tradicionales tanto químicos como mecánicos, es decir se puede continuar con la vida diaria, sin tener que cuidarse de los elementos de forma especial como normalmente ocurre cuando se trata de otro tipo de peelings.

Rangos de Tratamiento:

Face lifting, Reducción de Arrugas, Tratamiento de Poros Abiertos, Blanquea la Piel, Rejuvenece la Piel, Mejora la Apariencia de Estrías, Reduce la Apariencia de Cicatrices, Cura la Foliculitis y Trata Venas Rojas en la Nariz, Eficaz en Tratamientos de Acne, Remueve Pigmentaciones en Capas Profundas de la Epidermis, Mejora la Apariencia de la Piel al Humectarla, Regenera y Estimula el Crecimiento del Colágeno.

Ficha Técnica:

Características	Parámetros Tecnológicos
Fuentes de energía:	Combina el tratamiento con Oxígeno comprimido, aire comprimido y Agua
Sistema de Control:	Chip de sistema de control (Actualizable). Con sistema interno de auto prueba para asegurar un tratamiento seguro.
Cabezal de operación:	Fino cabezal de operación ergonómico que permite una fácil y precisa operación
Enfriador Integrado:	Sistema de enfriamiento que garantiza una operación estable y un tratamiento seguro
Dimensiones Físicas:	50 X 50 X 130 cm.
Peso Neto:	48 Kg.
Peso Bruto:	75 Kg.
Requerimientos Eléctricos:	A elección del cliente: 220 Volts, 3 Amperes, 50 Hertzios 110 Volts, 3 Amperes, 60 Hertzios
Potencia:	660 Watts

Precios de Lista:

Nombre del Equipo	Descripción General	Precio Unitario
YAG 80	Equipo para Eliminación de Tatuajes y manchas de la piel.	USD 8,000
IPL 50	Equipo para Depilación Definitiva, Rejuvenecimiento/Suavizamiento de la Piel, Tratamiento de Acne, Remoción Vascular, Remoción de Manchas y Desvanecimiento de Arrugas (Hasta 50 Joules/cm ²) con 6 cristales	USD 16,000
BE 20	Equipo para Embellecimiento del Busto	USD 20,000
GMF 20	Equipo multi-funcional para Embellecimiento del Busto, Depilación Definitiva, Rejuvenecimiento de la Piel.	USD 30,000
WO 20	Sistema de Jet Oxígeno/Agua	USD 18,000
WO 30	Sistema de Jet Oxígeno/Agua	USD 21,000
Cristal IPL Repuestos	Cristales para tratamientos: (Depilación Definitiva, Rejuvenece/Suaviza piel, Remoción de manchas, Acne, Remoción Vascular)	USD 965 c/u
Lámpara IPL	Lámpara para Maneral 60,000 disparos de garantía	USD 680 c/u

Políticas Comerciales:

- Precios en Dólares Americanos
- El tipo de cambio se fija el día del primer pago.
- La compra del equipo requiere 75% de anticipo y 25% a la entrega.
- Los pagos de anticipo y pago final se harán con depósito a cuenta de cheques en BANORTE, BANAMEX o pago con Tarjeta de Crédito por medio de PAYPAL.
- El tiempo de entrega promedio a partir del momento de pago es de 15 a 20 días hábiles.
- Garantía por escrito por un año. Aplican costos de envío.
- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Precios No incluyen I.V.A.

Contactos:

Oficina:

Recta a Cholula 530-54

San Andrés Cholula, Puebla, México

C.P. 72810 Teléfonos: (222) 1 30 88 67 y 2 69 01 51

Página: www.foreversoft.info y www.foreversoft.com.mx

- Ventas: Ing. Pedro García
 - Teléfono directo: (222) 2 69 01 51
 - Marcación desde otros países: + 52 (222) 2 69 01 51
 - Correo electrónico: pedrogarcia@foreversoft.info
- Operaciones, capacitación y taller: Ing. Edmundo Soriano
 - Cel. Fuera de Puebla: 045 (222) 239 1917 en Puebla cambiar 045 por 044
 - Marcación desde otros países: + 52 1 (222) 2 39 19 17
 - Correo electrónico: edmundosoriano@foreversoft.info